

Passo a passo

Equipamento de duas peças

Linha New Image



Com o auxílio da régua, mesure o seu estoma



Faça um molde no verso da base adesiva



Recorte a base adesiva



Retire o papel protetor



Aplique a base adesiva de modo que o estoma encaixe perfeitamente na área recortada e pressione suavemente.



Encaixe a bolsa coletora sem exercer pressão abdominal, pressionando apenas a flange da bolsa contra a flange flutuante da base adesiva. Um "click" confirmará o encaixe.



As bolsas drenáveis Hollister possuem fechamento integrado.



Caso utilize bolsa para urostomia, verifique se a válvula de drenagem está fechada - a gota deve estar virada para trás -



Pressione suavemente a pronto!



Caso utilize o cinto, encaixe as extremidades do mesmo nas abas laterais da bolsa coletora e ajuste.

Passo a passo

Equipamento de uma peça

Linha Premier



Com o auxílio da régua, mesure o seu estoma



Faça um molde no verso da base adesiva



Recorte a base adesiva




Retire o papel protetor



Aplique a base adesiva de modo que o estoma encaixe perfeitamente na área recortada e pressione suavemente.



Retire o papel protetor das bordas para aderir o adesivo hipoalergênico

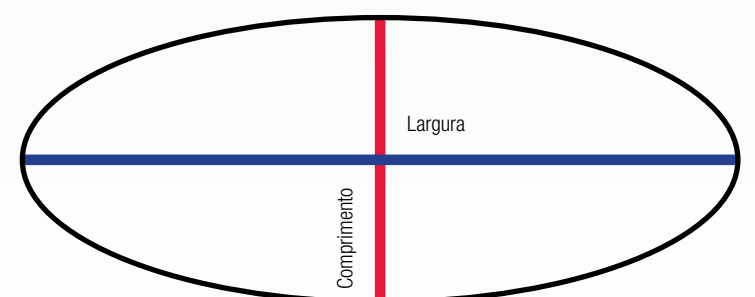

Lembrete

Caso seu estoma seja irregular, meça o comprimento e a largura



Conheça o **QualiVida**

Programa de Atendimento ao Estomizado

Estomia Hollister. Os Detalhes Importam.

0800 778 1000

Ligação gratuita
Horário comercial

qualivida@hollister.com.br

www.hollister.com.br