


Equipamento de 1 peça

Equipamentos coletores

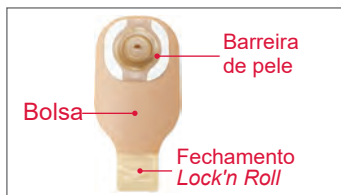

Reunir bolsa, saco para descarte, gaze e/ ou lenço para limpeza e água. Opcional: tesoura, caneta, guia mensurador e adjuvante se necessário.

Remova o equipamento usado



Levante cuidadosamente uma extremidade do adesivo e descole para baixo, empurrando suavemente a pele para longe da barreira de pele. Descarte adequadamente a bolsa usada na lixeira.

Limpe e seque a pele



Limpe a pele suavemente com água e/ ou com sabão, conforme recomendado pelo seu profissional de saúde. Enxágue e seque bem. Não use óleos, cremes, loções ou sabonetes do tipo loção na pele.


Verifique a condição da pele



Verifique se a pele ao redor do estoma está intacta, sem irritação, erupção cutânea ou vermelhidão.

**Entre em contato com o enfermeiro preferencialmente estomaterapeuta se notar irritação, erupção cutânea ou vermelhidão*


Prepare a barreira de pele e a bolsa

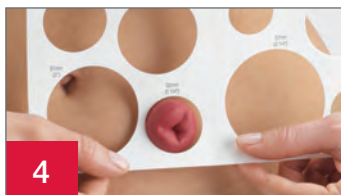

Meça o estoma usando um guia mensurador de estoma antes de cada aplicação da barreira (se estiver usando uma barreira pré-cortada vá para a etapa 7).



Demarque o tamanho da abertura para o recorte na barreira de pele. A barreira deve se acomodar onde a pele e o estoma se encontram. Verifique se não há pele periestomia visível entre a barreira e o estoma, evitando vazamentos e irritações na pele.

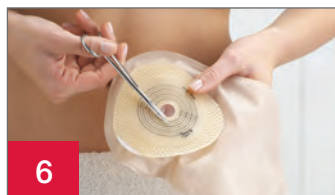

Usando uma pequena tesoura curva, corte cuidadosamente uma abertura na barreira de pele. Não corte além do limite da linha demarcada no verso da barreira. Cuidado para não perfurar a bolsa.



Remova a película protetora da barreira de pele.

Adicione a pasta ou anel se necessário



Se indicado, aplique o anel ou uma camada de pasta ao redor da abertura, seguindo as instruções de uso.



Centralize a abertura da barreira de pele sobre o estoma.



Aplique uma leve pressão na barreira de pele por cerca de um minuto para melhor aderência.



Para barreiras com borda adesiva, remova o papel da borda adesiva de ambos os lados e pressione o adesivo contra a pele.



Se estiver usando uma bolsa drenável, feche-a dobrando o fechamento **Lock'n Roll** na parte inferior da bolsa ou aplique um clamp.



Se estiver usando uma bolsa de urostomia, verifique se a válvula de drenagem está fechada. A gota, localizada na válvula de drenagem, deve ficar direcionada para o lado do seu abdômen. Se desejar, aplique o conector adicional, fornecido na caixa.

Equipamento de 1 peça

DICAS	LISTA DE PRODUTOS	CÓDIGO
<ul style="list-style-type: none">• A pele ao redor do estoma não deve apresentar sinais de erupção cutânea ou feridas• A pele irritada deve ser avaliada por um profissional de saúde• Se estiver usando anel ou pasta, aplique-o no lado adesivo da barreira de pele, próximo à abertura do estoma, conforme as instruções• Seu estoma provavelmente ficará inchado após a cirurgia. Pode levar várias semanas ou meses para que o estoma reduza para seu tamanho final• O estoma pode sangrar um pouco ao ser limpo• O uso de lenços protetores de pele não são recomendados sob barreiras de pele de uso prolongado, pois podem diminuir o tempo de uso do equipamento	Equipamento de 1 peça	_____
	Adjuvantes	
	<i>Anel plano</i>	_____
	<i>Cinto</i>	_____
	<i>Pasta</i>	_____
	<i>Lubrificante desodorante</i>	_____
<i>Pó de hidrocoloide</i>	_____	
<i>Outros</i> _____	_____	

Instruções adicionais

Para perguntas sobre produtos no Brasil, solicite o nosso atendimento QualiVida, mande um e-mail para qualivida@hollister.com.br ou ligue para **0800.778.1000**. A ligação é gratuita.

A pele deverá ser limpa e seca antes de aplicar a barreira.

Antes de usar, leia as Instruções de uso para obter informações sobre: uso, contra-indicações, avisos, precauções e instruções.

O logotipo da Hollister, Lock'n Roll e "Pele saudável. Resultados positivos." são marcas comerciais da Hollister Incorporated. © 2018 Hollister Incorporated. 923081-1118 US-00666

Hollister do Brasil
Av. Jabaquara 2958, 7º andar
São Paulo - SP
04046-500

www.hollister.com.br